

¿Estas cambiando de inyecciones diarias (MDI) al iLet?

El iLet es muy diferente a usar inyecciones diarias para manejar tu diabetes. Asegurémonos de que comprendas en qué se diferencia para que puedas usar el iLet de forma segura y con confianza.

Después de **GO BIONIC habrán algunos cambios importantes:**

Cómo recibes insulina:

Recibirás toda tu insulina a través del iLet.

Responde de inmediato a las alertas de iLet y a los problemas con tu sitio de infusión para asegurarte de que estás recibiendo insulina. Si esperas demasiado, tu glucosa en sangre aumentará rápidamente porque no tienes insulina de acción prolongada funcionando en tu cuerpo.

SUSPENDE todas las inyecciones de insulina.

NO te administres ninguna insulina adicional fuera de la que te proporciona el iLet, a menos que tu proveedor de atención médica te lo indique.

Si lo haces sin la ayuda de tu proveedor de atención médica, podrías tener una glucosa en sangre peligrosamente baja.

Estás conectado a un sistema de administración de insulina

El iLet necesita estar conectado a tu cuerpo para administrarte insulina

NO te lo retires por mucho tiempo. Puedes hacerlo por periodos breves para actividades como ducharte, nadar, hacer ejercicio. o practicar deportes.

Evita corregir en exceso una hipoglucemia

Si consumes demasiados carbohidratos para corregir una glucosa baja, puedes causar una hiperglucemia. Después, el iLet administrará más insulina, y tu glucosa podría bajar de nuevo. Este ciclo se conoce como "efecto montaña rusa."

 ¡SIEMPRE DESCONECTA el tubo de tu cuerpo antes de cambiar el cartucho o llenar el tubo! Si el tubo sigue conectado a tu cuerpo mientras haces esto, podrías introducir una gran cantidad de insulina que no necesitas. ¡Esto es muy peligroso!

Necesitas mantener el iLet funcionando para que pueda darte insulina.

- Manténlo lleno de insulina. **NO DEJES** que se quede sin insulina.
- Cárgalo. **NO DEJES** que se quede sin batería.
- Mantén el sitio de infusión funcionando correctamente. **¡Si tienes dudas, cámbialo!**
- Cambia tu sitio de infusión, cartucho de insulina, conexión iLet y el tubo a tiempo o si no están funcionando.
- Usa siempre tu MCG.
- Asegúrate de que el iLet esté recibiendo los valores del MCG
- Mantén las alertas ACTIVADAS y el volumen ALTO
- Responde rápidamente a todas las alertas del iLet para asegurarte de que esté funcionando y pueda administrarte insulina.