


1 Desconéctese de su cuerpo en el sitio de infusión.

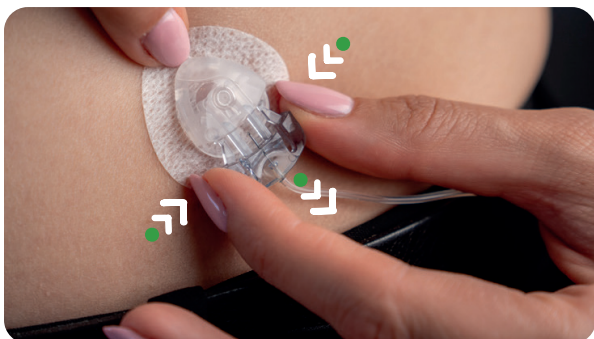

Sujeta la cinta adhesiva en su lugar colocando un dedo justo delante del alojamiento de la cánula y aprete suavemente los lados del conector. Separe la aguja del conector desde el alojamiento de la cánula.

 No desconectarse puede resultar en una administración excesiva de insulina.

 Si está usando cartuchos de bomba Fiasp precargados, salte al Paso 9.



Para obtener instrucciones completas y advertencias, consulte la guía del usuario.

2 Conecte la aguja a la jeringa.



3 Retire el aire excesivo del cartucho.



Use la jeringa y la aguja para eliminar el aire excesivo del cartucho.

Inserte la aguja de la jeringa en el cartucho y luego tire hacia atrás del émbolo de la jeringa hasta que el émbolo rojo esté en la parte superior del cartucho.



4 Jale la jeringa hacia atrás hasta la marca de 1.8 mL



5 Retire la tapa de la aguja sin tocar la aguja.



6 Inserte la aguja de la jeringa al vial de insulina



Presione el émbolo de la jeringa hasta que todo el aire haya salido de la jeringa.

7 Llene la jeringa con insulina.



Gire la jeringa y el vial. Jale el émbolo de la jeringa hacia atrás para llenar la jeringa hasta 1.8 ml de insulina de acción rápida U-100.



Retire las burbujas de aire según sea necesario.

8 Llene el cartucho del iLet con insulina




Coloque el cartucho en posición vertical sobre una superficie plana e inserte la aguja. Presione el émbolo de la jeringa para llenar el cartucho. Retire cuidadosamente todas las burbujas de aire del cartucho.



No sobrellene el cartucho

No llene el cartucho con más de 1.8 ml, ya que esto puede dañar el cartucho.

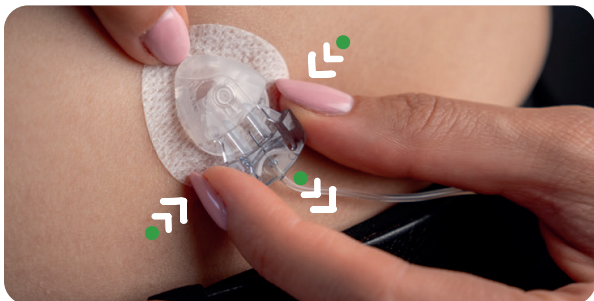


Antes de continuar, asegúrese de que el set de infusión esté desconectado de su cuerpo.

No desconectar puede resultar en una sobredosis de insulina.




9 En el iLet, toque el ícono del Cartucho de Insulina.



10 A continuación, toque la Opción de Cambio de Cartucho y Tubo

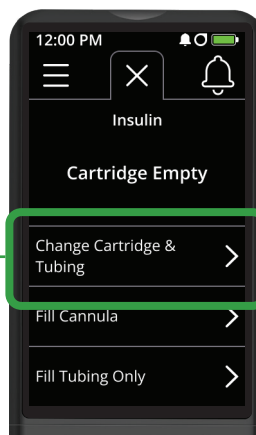

11 Deslícese a la derecha en Rebobinar.

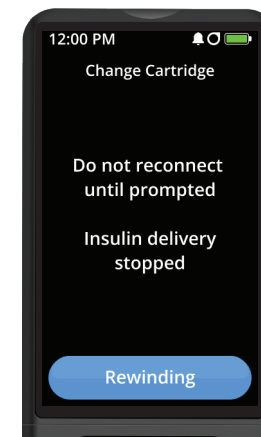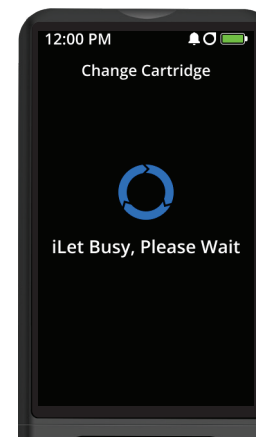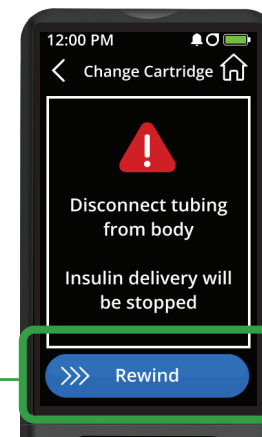

Por favor, espere mientras el iLet rebobina.





DEBE rebobinar antes de colocar un nuevo cartucho en el iLet.

Colocar el cartucho antes de rebobinar puede empujar toda la insulina hacia usted, causando una baja severa.

12

Remueva el cartucho viejo y el tubo y descártelo

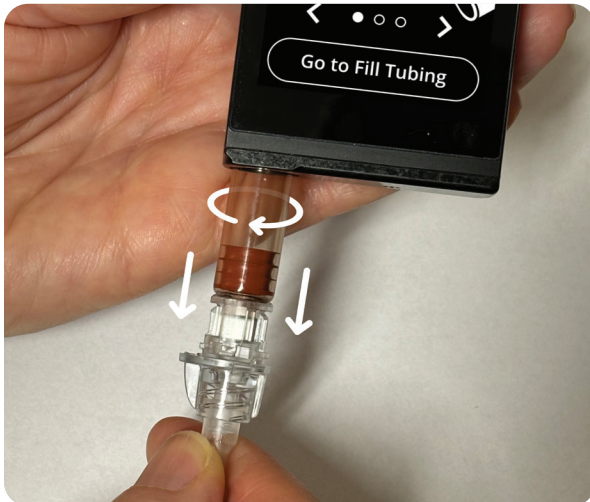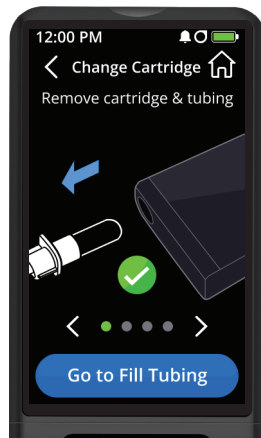

El tubo NO debe estar conectado a su cuerpo aún.

13

Coloque el nuevo cartucho lleno en el iLet.




El cartucho debe deslizarse fácilmente en el alojamiento del cartucho y quedar alineado con la base del iLet.



Colocar el cartucho antes de rebobinar puede empujar toda la insulina hacia usted, causando una baja severa.



No intente forzar el cartucho en el iLet.

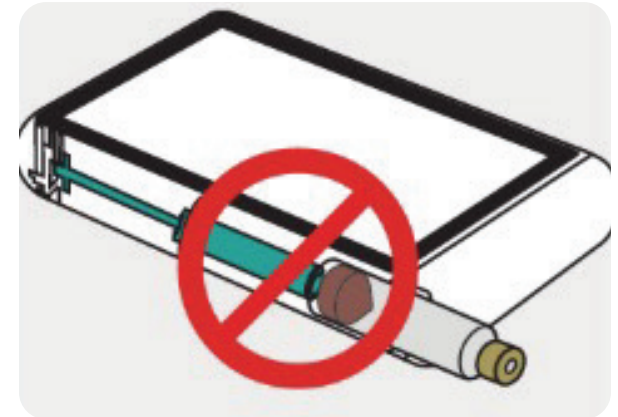

Si siente resistencia al insertar el cartucho, regrese al **Paso 11** y rebobine el iLet.



Nunca conectar el tubo al cartucho fuera del iLet.



14

Conecte un tubo nuevo con un conector/adaptador nuevo, girándolo hacia la derecha



Conecte un tubo NUEVO con un conector/adaptador NUEVO, girándolo hacia la derecha



NO REUTILICE LOS SUMINISTROS.




El tubo NO debe estar conectado a su cuerpo aún.



Asegúrese de que la conexión esté recta y apretada.

15 Coloque el conector en el iLet

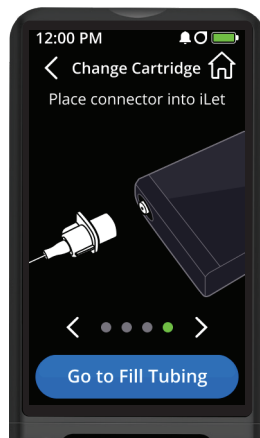

Inserte el conector con el lado plano mirando hacia el exterior del iLet. Empujelo hasta que esté plano contra el iLet.


 **NO REUTILICE LOS SUMINISTROS.**

 **El tubo NO debe estar conectado a su cuerpo aún.**





Gire el conector un cuarto de vuelta hacia la derecha para que el lado plano del conector quede alineado con la base del iLet.



16 Seleccione "Go to Fill Tubing" para llenar el tubo con insulina

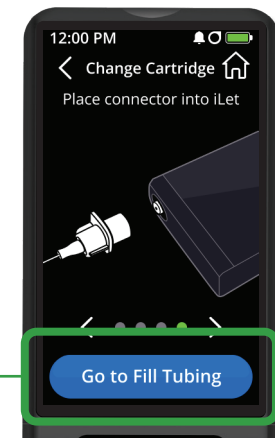

17 Presione y mantenga presionado "Press & Hold" para llenar el tubo.

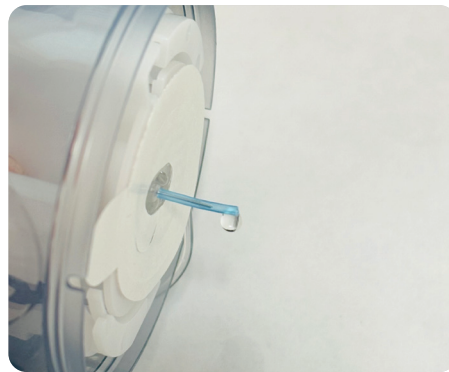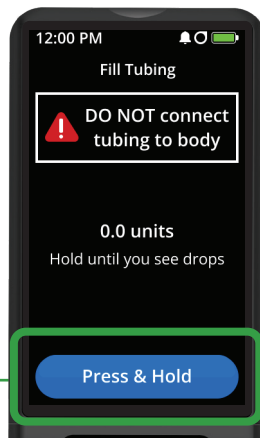

Inset

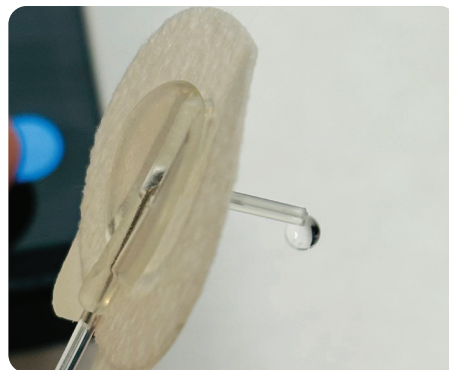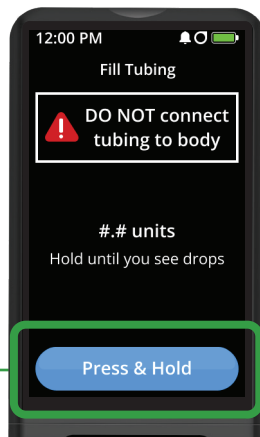


Contact Detach




Siga sosteniendo hasta que vea gotas de insulina goteando del extremo del nuevo tubo.

18 Toque "Yes" cuando las gotas de insulina sean visibles en el extremo del tubo.

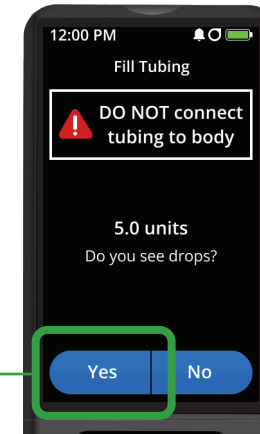

19 Inserte su nuevo set de infusión y seleccione "Next"

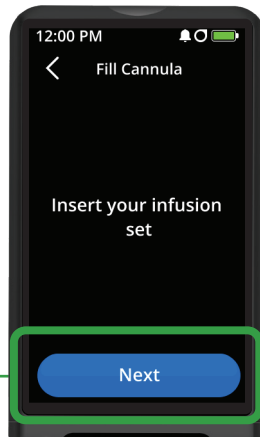

Para ayuda con este paso, llame al numero de servicio al cliente al 1-855-745-3800, Opción 1 o escanee los códigos QR a continuación para videos y recursos impresos.



Inset I
bit.ly/InsetFullChange





Contact Detach
bit.ly/ContactDetachFullChange

20 Llene la cánula con insulina



Seleccione el tipo y la longitud de cánula correcta y luego deslice hacia la derecha en "Fill" para llenar la cánula.

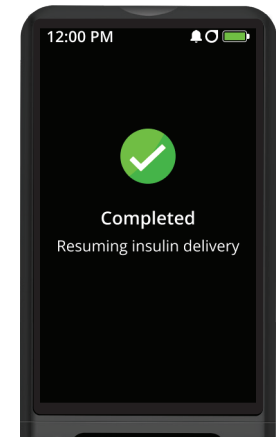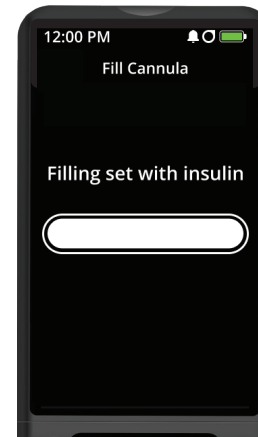

Una vez completado, su insulina se reanudará.

Atención al Cliente

Si en algún momento se siente inseguro al cambiar sus suministros, llame al numero de servicio al cliente para obtener ayuda al 1-855-745-3800, Opción 1.

Información de seguridad

El sistema de páncreas biónico iLet está indicado para su uso por personas con diabetes tipo 1 de 6 años de edad y mayores. El páncreas biónico iLet requiere prescripción médica. Consulte la Guía del Usuario del Sistema de Páncreas Biónico iLet en www.betabionics.com/user-guides, o para obtener información completa de seguridad, incluidas indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones, dispositivos compatibles, medicamentos compatibles e instrucciones, consulte www.betabionics.com/safety. NO comience a usar el sistema de páncreas biónico iLet sin una capacitación adecuada. Un uso incorrecto puede resultar en una entrega excesiva o insuficiente de insulina, lo que podría llevar a hipoglucemia o hiperglucemia.

MM000223-ES Rev A 06/2025